

FAQ/Häufige Fragen

ALLGEMEINE FRAGEN ZUR OPTUNE-THERAPIE

- WO ERHALTE ICH OPTUNE?
- IST OPTUNE FÜR MICH GEEIGNET?
- MUSS ICH FÜR DIE OPTUNE-THERAPIE IN EIN KRANKENHAUS?
- WERDE ICH WEITERHIN VON MEINEN MEDIZINISCHEN BETREUERN VERSORGT?
- IST OPTUNE IN DEUTSCHLAND ZUR BEHANDLUNG EINES GLIOBLASTOMS ZUGELASSEN?
- KANN ICH DAS SYSTEM ANWENDEN, WENN ICH SCHWANGER BIN?

ANWENDUNG VON OPTUNE

- WIE LANGE MUSS ICH OPTUNE TRAGEN?
- IST ES NORMAL, WENN SICH MEIN KOPF WARM ANFÜHLT, WENN OPTUNE EINGESCHALTET IST?
- KANN ICH MEINE EIGENE TRAGETASCHE VERWENDEN?
- KANN ICH MIT MEINEM HANDY TELEFONIEREN, WÄHREND ICH OPTUNE ANWENDE?
- KANN ICH MICH MIT OPTUNE IN DER SONNE AUFHALTEN?
- WAS MUSS ICH TUN, WENN DIE TRANSDUCER ARRAYS NASS WERDEN?
- WIE WEIß ICH, DASS ES ZEIT IST, DIE TRANSDUCER ARRAYS ZU WECHSELN?
- MUSS ICH DIE TRANSDUCER ARRAYS BEIM RÖNTGEN, CT ODER MRT ENTFERNEN?
- WAS MUSS ICH TUN, WENN BESTANDTEILE VON OPTUNE BESCHÄDIGT SIND?

UNTERWEGS

- KANN ICH WÄHREND DER BEHANDLUNG MIT OPTUNE AKTIV SEIN?
- KANN OPTUNE IM AUTO ANGEWENDET WERDEN?
- KANN ICH MIT OPTUNE VERREISEN?

Allgemeine Fragen zur Optune-Therapie

- Wo erhalte ich Optune?

Innerhalb Deutschlands und weiteren Ländern innerhalb Europas gibt es viele zertifizierte Behandlungszentren. Sie können sich zudem mit ihrer behandelnden Ärztin bzw. ihrem behandelnden Arzt in Kontakt setzen, die/der sich jederzeit bei Fragen zur Verfügbarkeit der Therapie an uns wenden kann.

- Ist Optune für mich geeignet?

Optune ist potenziell für Sie geeignet, wenn Sie über 18 Jahre alt sind und an einem neudiagnostizierten oder rezidivierenden Glioblastom leiden. Bitte besprechen Sie Ihren individuellen Fall mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Innerhalb Europas finden sich mehrere Behandlungszentren, die Optune verschreiben können. Eine vollständige Liste der Gegenanzeigen, möglichen Nebenwirkungen und Sicherheitsinformationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

- Muss ich für die Optune-Therapie in ein Krankenhaus?

Nein. Optune ist eine ambulante Therapie. Sie werden in der Regel zu Hause in der Verwendung der Optune-Therapie geschult und bekommen den Therapiestart in aller Ruhe erklärt. Für diese Schulung können Sie Ihre Bezugspersonen involvieren.

- Werde ich weiterhin von meinen medizinischen Betreuern versorgt?

Ihre behandelnde Ärztin/ Ihr behandelnder Arzt wird regelmäßige Untersuchungen, wie beispielsweise die Magnetresonanztomographie (MRT) durchführen, um feststellen zu können, ob Ihr Tumor auf die Optune-Therapie anspricht. Wenn Ihre behandelnde Ärztin/ Ihr behandelnder Arzt nicht zertifiziert ist Optune zu verordnen, kann Ihre Versorgung möglicherweise in einem anderen Zentrum koordiniert werden. Novocure kann interessierte Ärztinnen / Ärzte zertifizieren, so dass Sie in der Regel ihre Ansprechpartner nicht wechseln müssen.

- Ist Optune in Deutschland zur Behandlung eines Glioblastoms zugelassen?

Ja. Optune erhielt in Europa das CE-Zeichen und ist unter anderem in Deutschland zur Behandlung des neudiagnostizierten und rezidivierenden Glioblastoms bei Erwachsenen zugelassen. Die vollständigen Anwendungsindikationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

- Kann ich das System anwenden, wenn ich schwanger bin?

Optune wurde bei schwangeren Frauen noch nicht getestet. Optune darf nicht verwendet werden, wenn Sie schwanger sind oder der Verdacht auf eine Schwangerschaft besteht, bzw. wenn Sie schwanger werden möchten. Wirkung und Nebenwirkung von Optune in der Schwangerschaft sind nicht bekannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Ärztin/ Ihrem Arzt und in unserem Benutzerhandbuch.

Anwendung von Optune

- Wie lange muss ich Optune tragen?

Zu Beginn der Behandlung mit Optune besprechen Ihre Ärztinnen und Ärzte mit Ihnen, wie lange die Optune-Therapie verabreicht wird. Optune sollte möglichst kontinuierlich getragen werden, um das bestmögliche Ansprechen auf die Behandlung zu erreichen.

- Ist es normal, wenn sich mein Kopf warm anfühlt, wenn Optune eingeschaltet ist?

Während der Anwendung von Optune kann es zu einem Wärmeempfinden kommen. Die meisten Patientinnen und Patienten gewöhnen sich schnell daran. Wenn Sie unsicher sind oder Veränderungen in Bezug auf Ihren Gesundheitszustand feststellen, wenden Sie sich bitte, wie bei allen anderen Behandlungen auch, unverzüglich an Ihre Ärztin/ Ihren Arzt. Sicherheitsinformationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

- Kann ich meine eigene Tragetasche verwenden?

Optune verfügt über ein Belüftungssystem um eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden. Die mitgelieferte Tragetasche bzw. der mitgelieferte Rucksack oder die Tragetasche zum Gerät wurde speziell für eine korrekte funktionierende Belüftung entworfen. Es wird empfohlen, die mitgelieferten Taschen zu verwenden.

- Kann ich mit meinem Handy telefonieren, während ich Optune anwende?

Ja. Optune wurde so entworfen und getestet, dass es zu keinen Beeinträchtigungen mit anderen elektronischen Geräten gemäß den internationalen Standards kommt.

- Kann ich mich mit Optune in der Sonne aufhalten?

Ja. Aber bitte schützen Sie die Kopfhaut vor den Sonnenstrahlen.

- Was muss ich tun, wenn die Transducer Arrays nass werden?

Wenn die Transducer Arrays nass werden, lösen sich möglicherweise die Haftpflaster und der Kontakt mit der Kopfhaut ist nicht mehr sichergestellt. In diesem Fall ertönt ein Alarm und das Gerät wird abgeschaltet. Jedes Mal, wenn die Transducer Arrays nass werden, oder sich lösen, sollten sie gewechselt werden. Damit die Transducer Arrays nicht nass werden, bedecken Sie diese vor dem Duschen oder Baden mit einer Duschkappe. Bei Regen verwenden Sie möglichst einen Schirm oder setzen Sie einen Hut auf.

- Wie weiß ich, dass es Zeit ist, die Transducer Arrays zu wechseln?

Die Transducer Arrays sollten alle 3 bis 4 Tage gewechselt werden. Die Häufigkeit hängt davon ab, wie stark Sie schwitzen, oder wie schnell Ihre Haare nachwachsen. Nachwachsende Haare verschlechtern den Kontakt der Transducer Arrays mit Ihrer Kopfhaut. Ein häufiger Alarmton kann ein Hinweis darauf sein, dass unter Umständen ein Wechsel erforderlich ist.

- Muss ich die Transducer Arrays beim Röntgen, CT oder MRT entfernen?

Ja. Schalten Sie Optune ab und entfernen Sie die Transducer Arrays vor dem Röntgen, CT oder MRT. Bringen Sie anschließend neue Transducer Arrays an und setzen Sie die Optune Therapie fort.

- Was muss ich tun, wenn Bestandteile von Optune beschädigt sind?

Wenn das Gerät, oder Teile davon, beschädigt werden, rufen Sie Ihre/n persönliche/n Anwendungsberater/in an. Sämtliche Wartungsverfahren sind von qualifizierten und geschulten Mitarbeitern von Novocure durchzuführen.

Unterwegs

- Kann ich während der Behandlung mit Optune aktiv sein?

Bitte fragen Sie vor Reisen und körperlichen Aktivitäten Ihre Ärztin/ Ihren Arzt, um sicherzustellen, dass diese nicht mit einem Sicherheitsrisiko für Sie einhergehen. Es gibt keine Einschränkungen bei körperlichen Aktivitäten speziell im Zusammenhang mit der Anwendung von Optune.

- Kann Optune im Auto angewendet werden?

Ja, Optune ist tragbar und wird mit einer Batterie betrieben. Es kann aber nicht über die Autosteckdose betrieben werden. Wenn Sie länger als zwei Stunden unterwegs sein werden, nehmen Sie eine zusätzliche Batterie oder das Netzteil mit für den Fall, dass die Batterie leer wird. Wenn Sie keine Ersatzbatterie oder das Netzteil mitnehmen, kann es zu einer Therapieunterbrechung kommen, wodurch sich die Wirksamkeit der Optune-Therapie reduzieren kann. Fragen zur Fahrtauglichkeit besprechen Sie bitte mit Ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten.

- Kann ich mit Optune verreisen?

Ja. Bitte beachten Sie, dass Optune (einschließlich der Transducer Arrays) einen Alarm bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen auslöst und dass es Einschränkungen zum Transport von Lithium-Ionen-Batterien gibt. Der Kundenservice von Novocure arbeitet gerne mit der Fluggesellschaft zusammen, um Ihnen das Reisen zu erleichtern. Bitte kontaktieren Sie uns frühzeitig, um alle notwendigen Vorbereitungen und Formalitäten in die Wege zu leiten.

Bei Änderungen Ihres Gesundheitszustands oder Auftreten von Nebenwirkungen der Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt/ Ihre behandelnde Ärztin.

Für weitere Informationen
besuchen Sie unsere Website
oder rufen uns an.



www.optune.de
www.optune.de/videos



00800 88 343 537 (gebührenfrei)

WICHTIGE INFORMATION:

Für eine vollständige Übersicht zu Nebenwirkungen, Indikationen, Kontraindikationen, Warn- und Vorsichtshinweisen bitten wir Sie, die produktspezifische IFU zu beachten: www.optune.de/ifu